

HEG-APP: Anleitung zu Neuerungen in der Version 1.5.0

1. Admin Benutzer anlegen:

Beim Anlegen des Admins muss die Checkbox „ist ein Admin“ ausgewählt sein.

Klientendatenbank

Zurück

Vorname
Admin

Nachname
User

Geburtsdatum
1 1 1994

Geschlecht
Weiblich

Schwelle
- 100 +

Ist ein Admin
☒ Ist ein Admin

Schließen Akzeptieren

Trainingsmodus: [Icon] Schwierigkeit: sehr leicht

Verstrichene Zeit 2 - Admin User - 01.01.1994 - Weiblich

2. Nachdem Sie einen Admin angelegt haben, wählen Sie bitte „Einstellungen“ vom Hauptmenü danach „Admin Einstellungen“ oben rechts:

Die folgenden Einstellungen sind für einen Admin verfügbar:

- Das Admin Passwort kann gesetzt werden.
- Das Sperrdatum eines Benutzers kann eingestellt werden.
- Die Zeitbegrenzung eines Benutzers kann eingestellt werden.
- Der Zugriff eines Benutzers zu Training-Einstellungen kann eingestellt werden.
- Das Recht eines Benutzers seine Ergebnisse zu löschen kann eingestellt werden.

Als erstes sollen Sie Ihr Admin-Passwort setzen. Dann die Trainingseinstellungen für andere Benutzer wie folgenden konfigurieren:

- Benutzer auswählen.
- Sperrdatum setzen: bis wann darf der ausgewählte Benutzer trainieren.
- Zeitbegrenzung: wie lange darf der Benutzer täglich trainieren.
- Anschließend der Zugriff auf Einstellungen und die Berechtigung Ergebnis zu löschen.

Trainings Einstellungen

Admin Einstellungen

Neues Admin Passwort:

Max Mustermann

Sperrdatum: 01.01.3000

Zeitbegrenzung: unbegrenzt

Kann Einstellungen benutzen: ☒

Kann Ergebnisse löschen: ☒


Trainingsmodus: Schwierigkeit: sehr leicht

Verstrichene Zeit 2 - Admin User - 01.01.1994 - Weiblich


Zurück

3. Neue Favoriten hinzufügen:


- Button „Feedback auswählen“ anklicken

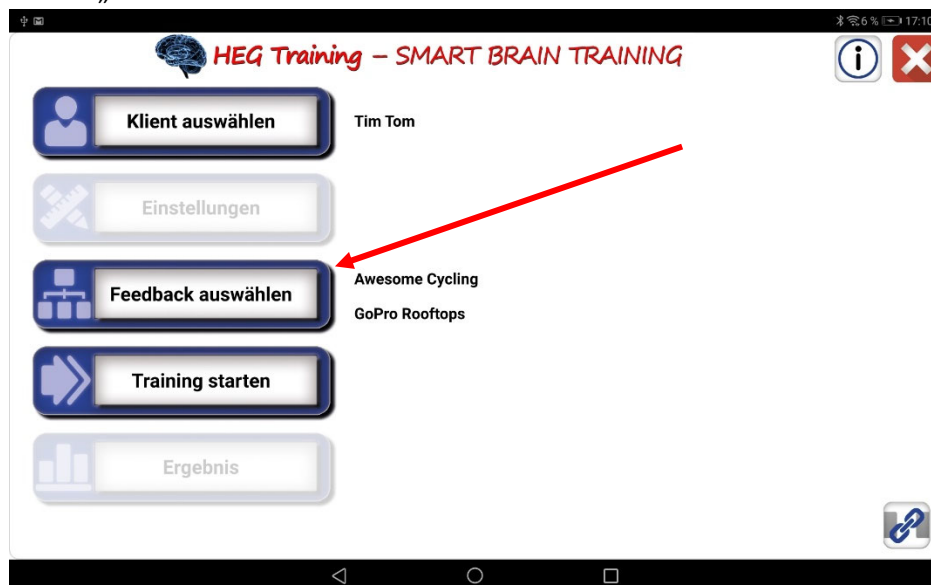


- Button „Neuer Favorit“ anklicken

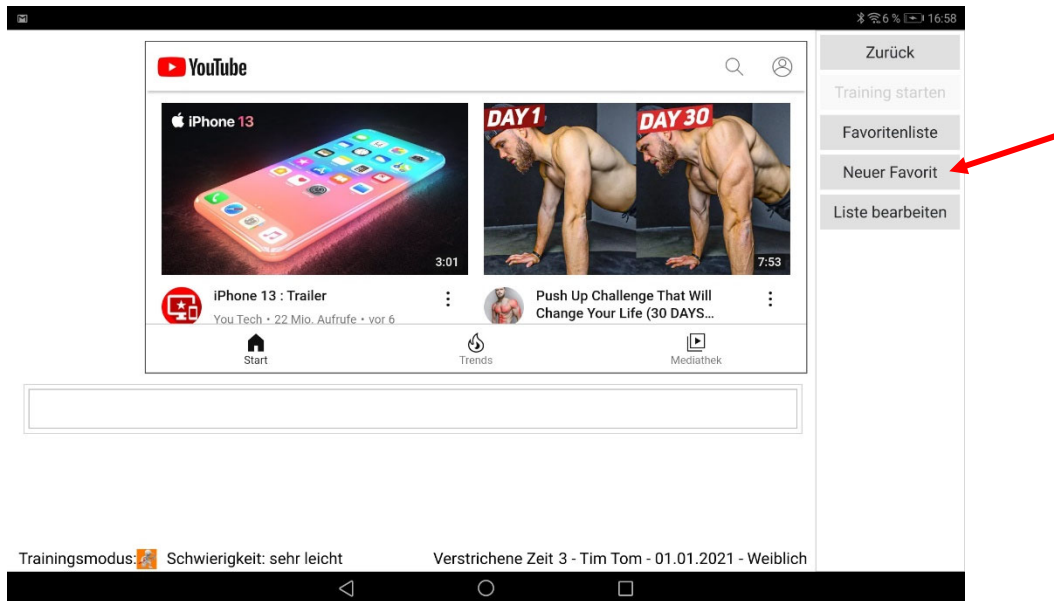


- Button „Youtube“ anklicken

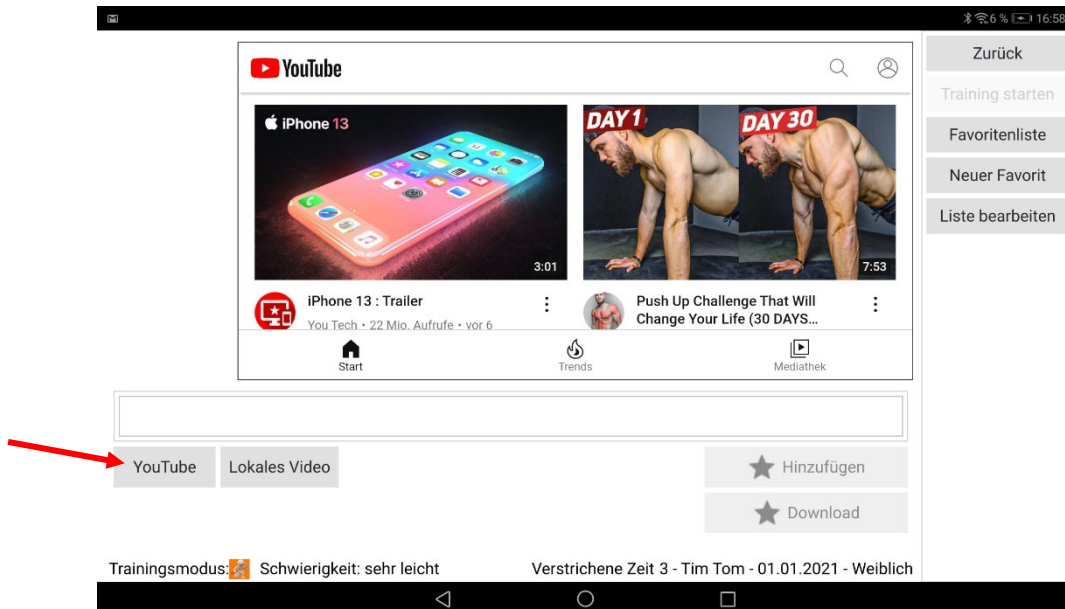

- Video heraussuchen und anklicken

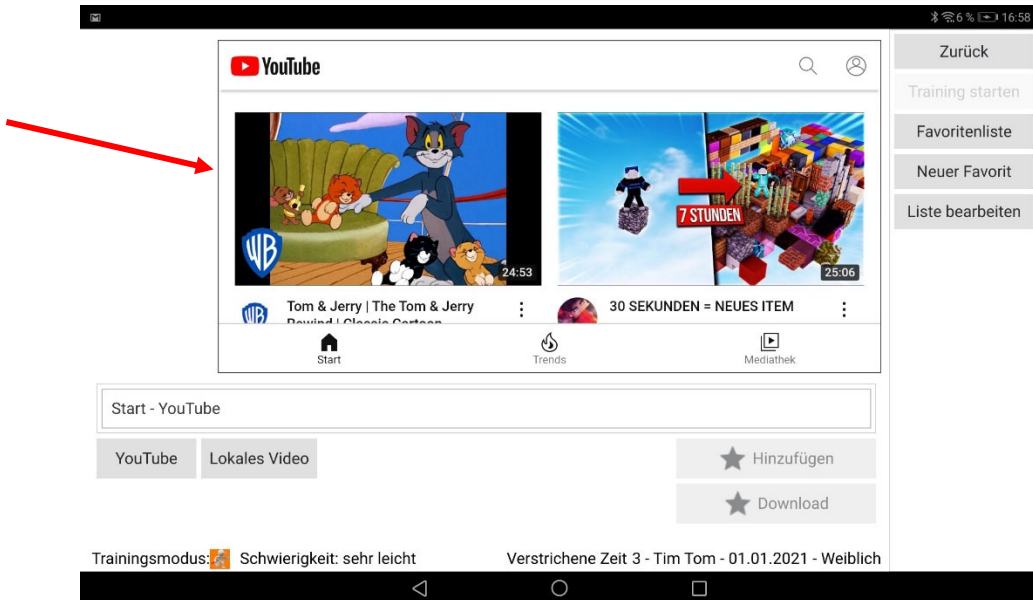

- Button „Hinzufügen“ ODER „Download“ anklicken (**Sehr wichtig !**)
Hinzufügen: die URL vom gewählten Video wird gespeichert.
Download: das Video als Mp4 Datei auf dem Gerät wird gespeichert.

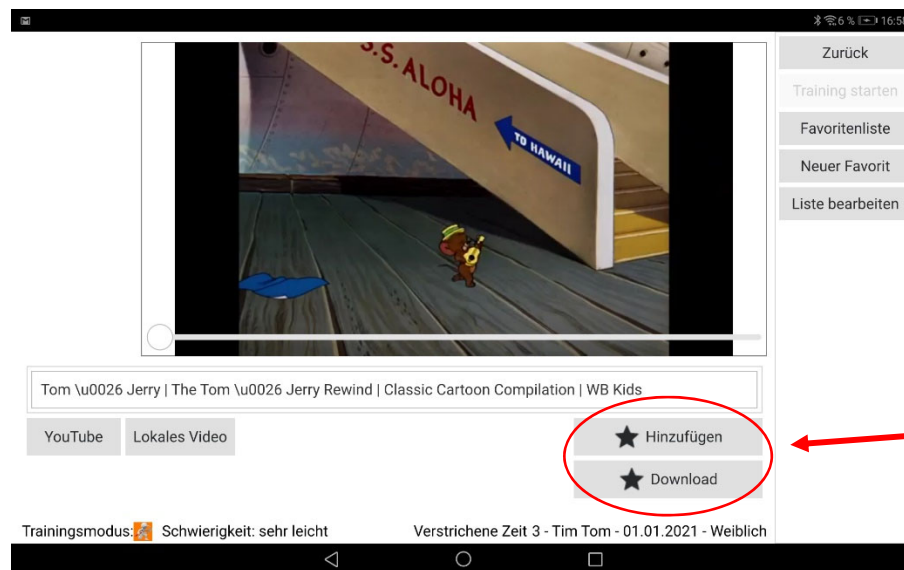

- Kategorien verteilen:
 - Empfohlen für: xxx
 - Alter
 - Genre (Aktion, ...)
 (Ist sinnvoll, ist aber nicht zwingend erforderlich)

Name: Tom \u0026 Jerry | The Tom \u0026 Jerry Rewind | Classic Cartoon Compilation | WB Kids

Empfohlen für: Konzentration | Entspannung | Beide

Mindestalter: 0 Höchster: 120

☐ Aktion
 ☐ Abenteuer
 ☐ Animation

☐ Biografie
 ☐ Zeichentrick
 ☐ Kinderfilm

☐ Komödie
 ☐ Verbrechen
 ☐ Dokumentation

☐ Drama
 ☐ Familie
 ☐ Fantasie

☐ Film Noir
 ☐ Geschichte
 ☐ Horror

Trainingsmodus: Schwierigkeit: sehr leicht Verstrichene Zeit 3 - Tim Tom - 01.01.2021 - Weiblich

- Button „Speichern“ anklicken.

Name: Tom \u0026 Jerry | The Tom \u0026 Jerry Rewind | Classic Cartoon Compilation | WB Kids

Empfohlen für: Konzentration | Entspannung | Beide

Mindestalter: 12 Höchster: 89

☒ Aktion
 ☐ Abenteuer
 ☐ Animation

☐ Biografie
 ☐ Zeichentrick
 ☐ Kinderfilm

☒ Komödie
 ☐ Verbrechen
 ☐ Dokumentation

☐ Drama
 ☒ Familie
 ☒ Fantasie

☐ Film Noir
 ☒ Geschichte
 ☐ Horror

Trainingsmodus: Schwierigkeit: sehr leicht Verstrichene Zeit 3 - Tim Tom - 01.01.2021 - Weiblich

- Für den Klienten die entsprechenden Videos anklicken, die er sehen soll.

Filter zeigen Alter: 0 - 120 Tim Tom

Awesome Cycling ☐
 GoPro Rooftops ☐
 Relaxing Ocean ☐
 Relaxing Landscapes ☐
 Tom \u0026 Jerry | The Tom \u0026 Jerry Rewind | Classic Cartoon Compilation | WB Kids ☒
 Die wahrscheinlich beste Ecke aller Zeiten | DAZN Champions League Flashback ☐
 Man Pranks People With Realistic Face Mask ☒
 Tom \u0026 Jerry | The Tom \u0026 Jerry Rewind | Classic Cartoon Compilation | WB Kids ☒

Trainingsmodus: Schwierigkeit: sehr leicht Verstrichene Zeit 3 - Tim Tom - 01.01.2021 - Weiblich

- Button „Training starten“ anklicken und das Training starten.

Filter zeigen

Alter: 0 - 120

Tim Tom

Awesome Cycling

GoPro Rooftops

Relaxing Ocean

Relaxing Landscapes

Tom \u0026 Jerry | The Tom \u0026 Jerry Rewind | Classic Cartoon Compilation | WB Kids

Die wahrscheinlich beste Ecke aller Zeiten | DAZN Champions League Flashback

Man Pranks People With Realistic Face Mask

Tom \u0026 Jerry | The Tom \u0026 Jerry Rewind | Classic Cartoon Compilation | WB Kids

Zurück

Training starten

Favoritenliste

Neuer Favorit

Liste bearbeiten

Trainingsmodus:  Schwierigkeit: sehr leicht

Verstrichene Zeit 3 - Tim Tom - 01.01.2021 - Weiblich