



**Wir sorgen für Wahrnehmung**  
Elternkatalog der *MediTECH* Electronic GmbH

# Wie fördere ich mein Kind bestmöglich?



Diese Frage stellen sich Eltern nicht nur in Deutschland jeden Tag. Gerade der schulische Erfolg ihrer Kinder liegt ihnen besonders am Herzen. Da herkömmliches Üben häufig nur wenig bringt, geht das Warnke®-Verfahren einen anderen, besseren Weg.

- Ist es im Unterricht für Ihr Kind zu laut?
- Geht Ihr Kind manchmal ungern in die Schule?
- Kann Ihr Kind sich bisweilen schlecht konzentrieren?
- Braucht Ihr Kind (zu) lange für die täglichen Hausaufgaben?
- Klappt manche Übung daheim, aber nicht in der Schule?
- Wünschen Sie sich einfach mehr schulischen Erfolg für Ihr Kind?

Der Weg zu schulischer Verbesserung führt über das Training von Basisfunktionen. Auch aus dem Gesundheitswesen wissen wir inzwischen, dass eine Symptombehandlung wenig erfolgreich ist, wenn nicht zugleich die eigentliche Ursache erkannt und überdauernd beseitigt wird. Diesem Grundsatz folgt das Warnke®-Verfahren: Mit ihm stärken Sie bei Ihrem Kind die Fähigkeiten, die es für schulischen Erfolg zwingend braucht.

## Förderung begleitet oder allein?

Es gibt zwei Möglichkeiten zur Umsetzung des Warnke®-Trainings für Sie:

1. Sie wenden sich an einen unserer Zertifizierten Lerntrainer nach Warnke® oder einen unserer Kooperationspartner. Kontaktadressen finden Sie unter [www.meditech-partner.de](http://www.meditech-partner.de). Dort lassen Sie Ihr Kind testen und sich für Ihr weiteres tägliches Training zuhause bestmöglich unterweisen. Wir empfehlen eine zusätzliche Begleitung durch einen unserer Partner.
2. Wo immer ein begleitetes Training (aktuell) nicht durchführbar ist, fördern Sie Ihr Kind selbstständig daheim mit den hier beschriebenen Möglichkeiten.

# In 3 Schritten zum schulischen Erfolg:

## Der *Brain-Boy*<sup>®</sup>

Der *Brain-Boy* trainiert wirkungsvoll diese Grundfertigkeiten.

Die besondere Wirksamkeit dieses Trainings beruht auf einem speziellen patentierten Verfahren, durch das das Gehirn spielerisch lernt.

→ *Brain-Boy*<sup>®</sup> (Seite 4)

Grundfertigkeiten  
zum sicheren  
Verarbeiten von  
Sprache im Gehirn  
verbessern

1

## Das Lateral-Training

- Zusammenarbeit der beiden Gehirnhälften stärken
- Aufmerksamkeit und Konzentration aktiv fördern
- Sprache sicherer verarbeiten und wahrnehmen
- Hören und Verstehen nachhaltig verbessern

→ Lateral-Trainingsset (Seite 6)

Nachhaltige  
Steigerung  
der Lern- und  
Merkfähigkeit

2

## Software zum spielerischen Lernen

- Anlegen eindeutiger innerer Wortbilder – Buchstabe für Buchstabe  
→ „*Orthofix*“ (Seite 8)
- Sicheres Rechtschreiben auch im üblichen Klassenlärm  
→ „*Diktate spielerisch vorbereiten*“ (Seite 8)
- Training der 81 wichtigsten Silben der deutschen Sprache  
→ „*WWTT*“ (Seite 9)
- Mit allen Sinnen wahrnehmen als Voraussetzung für erfolgreiches Lernen  
→ „*AUTRIS II*“ (Seite 9)

Gezieltes Training  
spezieller  
schulischer  
Anforderungen

3



# Der *Brain-Boy*®

Der *Brain-Boy*® trainiert wirkungsvoll die erforderlichen Grundfertigkeiten zum sicheren Verarbeiten von Sprache.

Mit den acht Trainingsfunktionen des *Brain-Boy*® eröffnet sich Ihr Kind die Grundlage für schulischen und sprachlichen Erfolg.

Die Übungen mit dem *Brain-Boy*® fördern Ihr Kind zielgerichtet. Sie stärken Fähigkeiten, die für Lesen, Schreiben, Rechnen und Aufmerksamkeit entscheidend sind. Mit dieser Grundlage führen Sie Ihr Kind zu größerem schulischen Erfolg. Die Wirksamkeit des *Brain-Boy*®-Trainings ist wissenschaftlich nachgewiesen.



*„Als meine Eltern mit diesem „Brain-Boy“ ankamen, war ich erst voll angenervt. Probiert habe ich es dann doch, und war überrascht, wie cool dieses Ding doch ist. Es macht echt Spaß, und irgendwie läuft's in der Schule jetzt einfach besser.“*

Florian Schaper, 11 Jahre, Offenbach

*„Unser Florian ist ein pfiffiger Junge. In der Schule läuft es gut; er sitzt aber immer viel zu lange an seinen Hausaufgaben, obwohl er sich richtig Mühe gibt – seit drei Monaten trainiert er mit dem Brain-Boy®. Seine Hausaufgaben gehen ihm jetzt viel flotter von der Hand, und er hat wieder mehr Zeit zum Spielen.“*

Christian Schaper, Offenbach

*„Meine Trainingskinder machen erstaunliche Fortschritte, seit sie zusätzlich täglich daheim mit dem Brain-Boy® üben. Was sonst viele Monate dauerte, entwickelt sich jetzt meist wesentlich schneller.“*

Ulrich Dillinger, Logopäde, Münster

Der *Brain-Boy*® trainiert...

- 1 Die Verarbeitungsgeschwindigkeit im Sehen:**  
Sie ermöglicht es, beim Lesen jeden einzelnen Buchstaben schnell und sicher zu erkennen.
- 2 Die Verarbeitungsgeschwindigkeit im Hören:**  
Sie ermöglicht es, beim Hören jeden einzelnen Buchstaben (Laut) schnell und sicher zu unterscheiden.
- 3 Das Richtungshören:**  
Mit dieser Fähigkeit blendet Ihr Kind Klassenlärm aus und kann so dem Lehrer leichter folgen.
- 4 Die Tonhöhenunterscheidung:**  
Die Betonung beim Sprechen verändert die Bedeutung des Gesagten.  
Mit dieser Fähigkeit kann Ihr Kind feine Unterschiede in Aussagen sicher(er) wahrnehmen.
- 5 Die Links-Rechts-Steuerung:**  
Mit dieser Übung wird die Fähigkeit, beide Gehirnhälften sicher miteinander zu verbinden, geschult. Ihr Kind lernt, leichter mehrere Dinge gleichzeitig zu leisten.
- 6 Die Reaktionsgeschwindigkeit:**  
Hören allein genügt nicht – schnelles Verstehen und Handeln sind entscheidend. Diese Übung ermöglicht rasches Reagieren. (z.B. Hören • Verstehen • Schreiben)
- 7 Die Mustererkennung (Tonfolge):**  
Diese Fähigkeit dient unter anderem zum Erkennen von Satzanfang und Satzende.
- 8 Die Mustererkennung (Tonlänge):**  
Diese Fähigkeit dient unter anderem dem Erkennen von Silben und der Satzbetonung.

Lieferumfang:

- *Brain-Boy*® Universal mit eingesetzter Batterie
- Kopfhörer MT-HS-16-IV (kleiner Klinkenstecker)
- 2 Gebrauchsanweisungen (Kinder und Erwachsene)



Unsere  
Zubehör-Empfehlung:



Kopfhörer MT-70 IV  
Art.-Nr. 7961 • 75,00 €



Schaumstoffhalterung  
Art.-Nr. 9059 • 15,00 €



*Brain-Boy*®  
Art.-Nr. 2222-Set  
199,00 €

# Das Lateral-Training

Sprache findet in der linken und der rechten Gehirnhälfte statt. Um schnell und sicher zu verstehen, müssen beide bestmöglich zusammenarbeiten.

Das Lateral-Training fördert die Vernetzung der beiden Gehirnhälften. Hörinformationen und die eigene Stimme wechseln dabei über Kopfhörer stetig von Ohr zu Ohr, sprich von Gehirnhälfte zu Gehirnhälfte.



*„Früher war ich in der Schule schnell müde und hatte einfach keinen Bock mehr. Seit vier Monaten übe ich mit dem Lateral-Trainer – irgendwie macht mir Lesen inzwischen richtig Spaß! Und als meine Lehrerin mich das erste Mal lobte, wie gut ich jetzt mitmachen würde – das war einfach genial!“*  
Sascha Kern, 10 Jahre, Oldenburg

*„Schule und Hausaufgaben waren mit unserem Sascha immer ein K(r)ampf. Es tat mir in der Seele weh, zu sehen, wie er sich täglich quälte, und doch nur wenig dabei herauskam. Seit uns unsere Logopädin den Lateral-Trainer empfahl, blüht unser Sohn richtig auf: Das tägliche Üben ist zwar anstrengend, aber es lohnt sich: Entspannte Eltern, glücklicher Sohn.“*  
Ute Helmrich-Kern, Oldenburg

## Wie funktioniert das Training?

Ihr Kind hört einen Text von CD im Kopfhörer (wandernd von Ohr zu Ohr). Dabei liest es stumm den wortgleichen Text in seinem Textheft mit.

Anschließend spricht Ihr Kind denselben Text ins Mikrofon. Es hört jetzt seine eigene Stimme wandernd von Ohr zu Ohr.

Im dritten Schritt hört Ihr Kind den Text von der CD und spricht (liest) parallel dazu ins Mikrofon. Dabei sind die eigene und die fremde Stimme stets entgegengesetzt zu hören; beide wandern auch hier von Ohr zu Ohr.

Später liest Ihr Kind auch Texte durch eine besondere Verdunklungsbrille „von Auge zu Auge“. Ähnlich wie beim Hören werden hier abwechselnd das linke und das rechte Auge angesprochen.

## Was können Sie vom Lateral-Training erwarten?

Durch das gleichzeitige Hören der eigenen und der fremden Stimme als Vorbild lernt Ihr Kind automatisch, Sprache besser zu verstehen. Wortschatz, Aussprache und Rechtschreibung gehören zu den Fähigkeiten, die das Lateral-Training gezielt fördert.

Lerninhalte verankern sich überdauernd – Vokabeln etwa sitzen auf Sicht, nicht nur für den nächsten Test. Informationen werden dank Lateral-Training im Langzeit- und nicht im Kurzzeitgedächtnis gespeichert.

Die wichtigsten Leistungsmerkmale:

- Anschlussmöglichkeiten für zwei Mikrofone und Kopfhörer
- Anschluss für Spezialbrille
- Hinzuschaltbare spezielle Konsonantenveredelung (integriert)
- Zuschaltbarer Rauschgenerator
- Mono/Stereo-Funktion
- Kunstkopfstereofone CDs abspielbar
- Speicherung aller Einstellungen



Zusätzlich erforderlich:



Übungsmaterial für  
das Heim-Lateral-Training  
Art.-Nr. 10037 • 250,00 €

Wir empfehlen:  
Standardlösung



Lieferumfang:  
AlphaTrainer Home  
CD-Spieler inkl. Verbindungskabel  
Spezialbrille  
1 Kopfhörer MT-70 IV  
1 Mikrofone MT-DS-50  
1 Hörsprechgarnitur MT-801  
Übungsmaterial (siehe oben)

AlphaTrainer Home -  
Standardlösung  
Art.-Nr. AlphaTH-Set02 • 1.679 €

**Hinweis:**

Der AlphaTrainer Home ist  
auch mit individueller  
Zusammenstellung des  
Zubehörs und als Koffer-  
lösung erhältlich.  
Sprechen Sie uns gern an.

ohne Zubehör

Bitte beachten Sie auch unser Mietmodell  
mit Kaufoption zum leichteren Einstieg!

AlphaTrainer Home  
Art.-Nr. 10907-Set  
745,00 €

2

# Software zum spielerischen Lernen



## Orthofix® für sicheres Rechtschreiben

Gute Rechtschreiber nutzen keine Regeln...

Immer öfter berichten Eltern und Lehrer von schwachen Rechtschreibleistungen der Kinder – trotz oft übermäßigen Übens. Orthofix® schafft das, was einen guten Rechtschreiber ausmacht: Eindeutige innere Wortbilder. Der Schreibende sieht sofort, ob das Wort so geschrieben ist, wie er es im Kopf abgespeichert hat.

Mit einem ausgefeilten pädagogischen Verfahren lernt auch Ihr Kind spielerisch die Klippen der Rechtschreibung erfolgreich zu umschiffen – mit Spaß und einem Einsatz, der sich lohnt.

Gute Rechtschreiber nutzen keine Regeln. Warum sollten schwache Rechtschreiber sie lernen? Orthofix® bietet hier den richtigen (Aus)weg. Durch das gekoppelte Hör- und Sehtraining erschließen Sie sich sichere Rechtschreibung – Buchstabe für Buchstabe.

FLIC kann als CD-ROM oder als Download-Version bezogen werden. Bitte wählen Sie zwischen den beiden Optionen aus.

Nähere Informationen finden Sie auch unter [orthofix.meditech.de](http://orthofix.meditech.de).

Orthofix® ist auch für die **englische Sprache** verfügbar (einzeln oder als Teil des FLIC-Trainings).

Art.-Nr. 6827 • 75,00 €  
[orthofix.meditech.de](http://orthofix.meditech.de)



## Diktate spielerisch vorbereiten

Rechtschreiberfolg daheim UND in der Schule

Immer wieder berichten Eltern, dass ihre Kinder Diktate zu Hause sicher meistern und beim gleichen Diktat am nächsten Tag in der Schule scheitern. Woran liegt dies? Die Voraussetzungen daheim und in der Schule sind grundverschieden. Während es daheim ruhig ist und wenig Stress entsteht, steht in der Schule viel auf dem Spiel. Gleichzeitig ist es dort unruhig mit vielen verschiedenen Störfaktoren.

*Diktate spielerisch vorbereiten* holt den Klassenraum nach Hause. In kleinen Schritten bereiten Sie Ihr Kind mehr und mehr darauf vor, Klassenraum-überlebensfähig zu werden. Im Hintergrund der Diktatübung ist in der Lautstärke regelbarer Klassenlärm zu hören. Die über Kopfhörer wahrzunehmende Lehrerstimme wandert – wie oft auch im Schulalltag – merklich umher. Wie lange Ihr Kind zum Schreiben Zeit hat und wie oft jeder Teilsatz wiederholt wird, all dies stellen Sie im Programm stufenweise immer schwerer für Ihr Kind ein. So lernt es, nicht nur bei Ihnen, sondern auch im Schulalltag erfolgreich zu sein.

Nähere Informationen finden Sie auch unter [diktate.meditech.de](http://diktate.meditech.de).

Diktate spielerisch vorbereiten

Art.-Nr. 6806 • 75,00 €

[diktate.meditech.de](http://diktate.meditech.de)

*„Unser Sohn Niklas lernte Schreiben in der Schule nach der „Schreib-wie-Du-hörst“-Methode. Auch korrigieren durften wir – laut Lehrerin – nie. Im Ergebnis war seine Rechtschreibung katastrophal. Mit Orthofix® lernt Frank jeden Tag zehn neue Wörter. Er **sieht** jetzt die richtige Schreibweise in seinem Kopf – und bringt sie zu Papier. Danke!“*

Martin Schüssler, Bargteheide

## WWTT – Trainingssoftware für sicheres Hörverstehen

Erinnern Sie sich, als Sie das letzte Mal einen englischen Text gehört haben? (Wahrscheinlich) war das Zuhören anstrengend. Jeden einzelnen Laut haben Sie auch nicht wahrgenommen, wohl aber den Inhalt (hoffentlich) weitgehend verstanden.

Stellen Sie sich vor, dass es Ihrem Kind jeden Tag so geht – beim Hören seiner Muttersprache.

- Wundern Sie sich dann noch, dass Ihr Kind nach 2-3 Schulstunden einfach müde ist?
- Ihr Kind reagiert nicht schnell genug?
- War vielleicht im Vorschulalter die Aussprache undeutlich/verwaschen?

Mit der WWTT-Software trainiert Ihr Kind die 81 wichtigsten Silben der deutschen Sprache. Dabei hinterlegen Sie mehr und mehr Störgeräusch; so lernt Ihr Kind, auch im unruhigen Klassenzimmer Lehrer und Mitschüler sicher und anstrengungsfrei zu verstehen.

So wird aus „[D]itte höre [d]leich [d]ut zu ...“ künftig gleich „Bitte höre gleich gut zu ...“

– sicheres Hören und Verstehen im Alltag ohne unverhältnismäßige Anstrengung (hilft übrigens auch Erwachsenen ...).

Nähere Informationen finden Sie auch unter [wwtt.meditech.de](http://wwtt.meditech.de).



Die WWTT-Software ist auch für die **englische Sprache** verfügbar (einzeln oder als Bestandteil des FLIC-Fremdsprachentrainings).

Art.-Nr. 6825 • 99,00 €  
[wwtt.meditech.de](http://wwtt.meditech.de)

## AUTRIS II – Software für spielerisches Aufmerksamkeitstraining

Kurzzeitmerkfähigkeit, Richtungshören und genaues Hörverstehen sind entscheidend für sicheres Sprachverstehen und schulischen Erfolg. Mit AUTRIS II trainiert Ihr Kind spielerisch diese und weitere Fertigkeiten.

- Buchstabenreihen
- Lautverstehen
- Tonhöhenunterscheidung
- Richtungshören
- Zahlenfolgen

gehören zu den Möglichkeiten, die mit insgesamt 50 unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen ab 5 Jahren aufwärts trainiert werden können. Ihr Kind hört (vorzugsweise) über Kopfhörer Musterfolgen und soll diese in die richtige Reihenfolge bringen – ein Spaß für die ganze Familie.

Nähere Informationen finden Sie auch unter [autris.meditech.de](http://autris.meditech.de).



3

AUTRIS II

Art.-Nr. 6815 • 49,00 €

[autris.meditech.de](http://autris.meditech.de)

„Anfangs setzte ich den WWTT mit gutem Erfolg in meiner Praxis ein. Seitdem meine Trainingskinder damit nun auch daheim üben, verbessern sich Aussprache und Hörverstehen noch schneller – zur Freude aller.“

Irina Kehlert, Logopädin, Walkenried

„Autris gab es von Oma zu Weihnachten. Dieses Spiel macht echt Spaß, und Mama sagt „es nützt auch“. Darum darf ich es so oft spielen, wie ich will – cool!“

Daniel Wellhausen, 9 Jahre, Limburg

# Software zum spielerischen Lernen



Das Selbsttrainingssystem für den Fremdspracherwerb (Hard- und Software)

## FLIC Deutsch-Englisch

Fremdspracherwerb mit kindlicher Leichtigkeit – wer wünscht sich das nicht?

Im Schul- und Berufsalltag fällt das Lernen fremder Sprachen hingegen oft schwer.


Mit FLIC ist es gelungen, die kindliche Leichtigkeit des Sprachenlernens „einzufangen“ und jedem Lernenden zugänglich zu machen.

In fünf Programmteilen bietet FLIC ein pfiffiges Gehirntraining für die ganze Familie. Diese sind

- Orthofix® (siehe Seite 8)
- WWTT (siehe Seite 9)
- Vokabeltrainer
- Satztrainer
- Dialogtrainer

In Verbindung mit der FLIC-Trainingshardware (Lateraltrainer nebst Spezialkabelset) erhalten Sie ein aus einem EU-Forschungsprojekt entstandenes hochwirksames Sprachlernsystem. Mehrere europäische Universitäten haben die Überlegenheit dieses Sprachtrainings gegenüber üblichen Lernsystemen überprüft.

Nähere Informationen finden Sie auch unter [flic.meditech.de](http://flic.meditech.de).

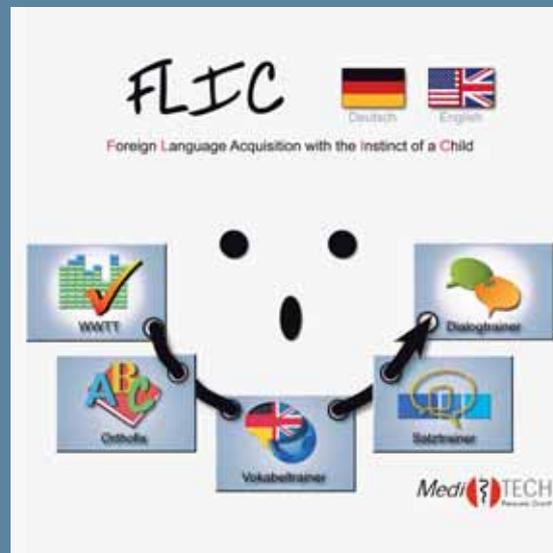

FLIC Deutsch-Englisch

Art.-Nr. 6864  
399,00 €

*„Fremdsprachen sind ja nun wirklich nicht meine Begabung. Aber beruflich komme ich daran nicht vorbei. Anders als bisher lerne ich dank FLIC mit Leichtigkeit... inzwischen gemeinsam mit meinem Sohn Lukas, der diese Art zu lernen echt „cool“ findet.“*

Andreas Agnelli, Düren

*„At first we were skeptical, then we tried... now we are convinced. FLIC is an amazing new approach to language learning. We would not want to miss it in our daily routine.“*

Nicholas Vaughn, Primary School Teacher, Plymouth GB

# Unser Service für Sie

**Wir stehen montags bis freitags  
von 8:30 bis 17:00 Uhr  
persönlich und telefonisch  
für Ihre Fragen zur Verfügung.**

Ob Sie nun Fragen zu Trainingsmöglichkeiten, regionalen Experten oder technischen Details haben – Sprechen Sie uns gern an.

Durch zahlreiche kompetente Partner vor Ort sind wir zusätzlich für Sie erreichbar.

## Miet-Modell mit Kaufoption

Sie haben von den Erfolgen des Lateral-Trainings gehört und möchten es selbst einsetzen. Sie sind sich aber noch nicht sicher, ob Ihr Kind mit dem Gerät arbeiten wird, und möchten daher die Bedienung erproben.

Für diese Zwecke steht das Miet-Modell mit Kaufoption zur Verfügung. Geräte ab einem Warenwert von 300,00 € können für einen unbestimmten Zeitraum ausgeliehen und auf ihre Wirksamkeit getestet werden. Die monatlichen Mietgebühren rechnen wir bei Kauf – abhängig von der Miet-Laufzeit – teilweise an.

Weitere Informationen geben wir Ihnen gern.

## Lieferung

Was Sie werktags bis 12:00 Uhr bei uns bestellen, bringen wir noch am selben Tag zu Ihnen auf den Weg. In aller Regel liegt Ihnen die bestellte Ware spätestens nach zwei Werktagen vor – wir lassen Sie nicht warten!



## Gewährleistung

Auf Produkte aus *MediTECH*-Herstellung haben Sie ab Lieferung einen 24-monatigen Gewährleistungsanspruch.

## Zahlungsmodelle

Bei uns können Sie wählen, ob Sie per Vorabüberweisung, per Paypal oder bequem per Lastschrift bezahlen möchten. Geben Sie uns den von Ihnen bevorzugten Weg an – bei Lastschrift oder Kreditkarte erledigen wir bei Vorliegen der erforderlichen Informationen alles Weitere für Sie. Bitte nutzen Sie dafür das Lastschrift-Feld auf dem Bestellformular.

Sie wünschen ein Leasing- oder ein maßgeschneidertes Finanzierungsmodell? Sprechen Sie uns an!

## Technische Änderungen

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, sind jederzeit vorbehalten; insbesondere können bestehende Erzeugnisse durch Nachfolgetypen mit gleichen oder verbesserten technischen Eigenschaften abgelöst werden.

Auch Typen- und Preisabweichungen bleiben vorbehalten.

Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig! Wir setzen uns mit aller Kraft dafür ein, Ihren Wünschen gerecht zu werden.

**Tel. +49 (0)5130/97778-0**

# Bestellformular

	Artikel	Art.-Nr.	Preis (Euro) inkl. MwSt.	Bestellung	
				Menge	Preis
1.	Brain-Boy	2222-DE-Set	199,00		
2.	AlphaTrainer Home komplett inkl. Übungsmaterial	AlphaTH-Set02	1.679,00		
3.	Orthofix deutsch (Software) <input type="radio"/> CD <input type="radio"/> Download <small>(keine Auswahl =&gt; CD)</small>	6827-V03-DE	75,00 / 65,00		
4.	Orthofix englisch (Software) <input type="radio"/> CD <input type="radio"/> Download <small>(keine Auswahl =&gt; CD)</small>	6827-V03-EN	75,00 / 65,00		
5.	Diktate spielerisch vorbereiten (Software)	6806	75,00		
6.	WWTT (Trainingssoftware zur Lautunterscheidung)	6825-V03	99,00		
7.	AUTRIS II (Software für auditives Aufmerksamkeitstraining)	6801	49,00		
8.	FLIC Trainingssoftware zum Fremdsprachenlernen	6864	399,00		
9.					

Zur Zahlung per:  Vorüberweisung (Standard, wenn keine andere Wahl getroffen wurde)

Kreditkarte (Daten bitte unten ausfüllen und unterschreiben)

Lastschrift (Einverständniserklärung unten bitte ausfüllen + unterschreiben)

zzgl. 6,90 Euro Versandkosten\*

\* in Deutschland.  
Kosten im Ausland: Auf Anfrage

Hiermit bestelle ich verbindlich die oben angegebenen Artikel: *MediTECH Electronic GmbH*

Name .....

Vorname .....

Geb.-Datum .....

Straße .....

PLZ/Ort .....

Land .....

Telefon .....

Email\* .....

Datum .....

Unterschrift (für die Bestellung)

Bestellannahme  
Langer Acker 7 • D-30900 Wedemark  
Telefon: +49 - (0)5130/97778-0  
Telefax: +49 - (0)5130/97778-22  
Mail: service@meditech.de

Überreicht durch:

## Datenschutz

Ich stimme zu, dass meine oben angegebenen, personenbezogenen Daten von der *MediTECH Electronic GmbH* sowie die für mich regional zuständige Handelsvertretung gespeichert und verarbeitet werden dürfen. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Datum .....

Unterschrift (für Zustimmung)

**Kreditkartenzahlung:** Der offene Betrag soll via Kreditkarte berechnet werden:

Ich / wir ermächtige(n) die *MediTECH Electronic GmbH*, den offenen Betrag via unten angegebener Kreditkarte abzubuchen.

MasterCard  VISA

Kartenummer

/  
Gültigkeit

Prüfziffer

**Einzugsermächtigung (Lastschrift):** Ich / wir ermächtige(n) die *MediTECH Electronic GmbH*, Zahlungen vom unten genannten Konto mittels Lastschrift einzuziehen (Gläubiger-Identifikations-Nr. DE83 ZZZ0 0000 0102 12). Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von *MediTECH Electronic GmbH* auf mein Konto eingezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen\*\*.

Geldinstitut

IBAN

Kontoinhaber

Datum

Unterschrift (für Einverständnis)

\* Bitte geben Sie bei Zahlung per Vorkasse oder Nutzung des Lastschriftverfahrens Ihre Email-Adresse an. Sie erhalten auf diesem Wege eine Einzugsbestätigung.

\*\* Bei Nichtdeckung des Kontos oder Angabe von falschen Daten werden 10 Euro Nachgebühren erhoben.

# Allgemeine Geschäftsbedingungen der *MediTECH Electronic GmbH* (Consumergeschäft)

Stand 28.05.2020

## § 1 Allgemeines

- (1) Vertragspartner im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist diejenige Partei, die mit uns in geschäftliche Beziehung tritt. Dies gilt sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmer im Sinne des Gesetzes.
- (2) Unsere Angebote sind freibleibend. Sofern von uns Auftragsbestätigungen oder Bestätigungsschreiben versandt werden, sind diese maßgebend für den Vertragsinhalt.
- (3) Abbildungen, Zeichnungen, Gewichtsangaben, Beschreibungen usw. in Angeboten, Preislisten und sonstigen allgemeinen Drucksachen sind bestmöglich erstellt bzw. ermittelt. Sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind, behalten wir uns unwesentliche Abweichungen vor. An Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten ohne unsere Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden.
- (4) Mit Erscheinen des jeweils neuesten Titels einer von uns herausgegebenen Druckschrift bzw. mit der Veröffentlichung von neuen Angeboten verlieren alle vorhergehenden Angebote und Preise ihre Gültigkeit.
- (5) Bei Bestellungen über das Internet gelten zusätzlich unsere Online-Geschäftsbedingungen, die in ihrer jeweils gültigen aktuellen Fassung unter [www.agb.meditech.de/](http://www.agb.meditech.de/) abrufbar sind.

## § 2 Lieferbedingungen/Versand

- (1) Ereignisse höherer Gewalt, wie z. B. ein rechtmäßiger Arbeitskampf in unserem oder fremden Betrieben, von denen wir durch Materialbezug abhängig sind, ferner Krieg usw., berechtigen uns, die Erfüllung des Vertrags hinauszuschieben. Schadenersatzansprüche sind in diesen Fällen ausgeschlossen.
- (2) Im Falle eines rechtswidrigen Arbeitskampfes kommt eine Haftung nur bei grobem Verschulden in Betracht.
- (3) Vorbehaltlich sofortiger Verfügbarkeit der Ware liefern wir schnellstmöglich per Paketdienst, Post oder per Spedition. Wir haften nicht für die Einhaltung von Lieferterminen, soweit wir einen solchen Termin nicht schriftlich bestätigt haben. Im letzteren Fall beschränkt sich unsere Ersatzpflicht auf die kostenlose Rücknahme verspätet gelieferter Waren.
- (4) Hat der Vertragspartner die Zahlung per Vorkasse gewährt, so versenden wir die Ware nicht vor Zahlungseingang.
- (5) Der Versand erfolgt im Allgemeinen per Paketdienst (UPS) oder Post (Ausland), wobei je nach Größe und Gewicht des Transportgutes auch andere Versandformen, wie private Paketdienste, Spedition, Luftfracht oder Bahnfracht, möglich sind. Die Wahl der geeigneten Versandform und des Transportmittels liegt bei uns.
- (6) Innerhalb Deutschlands übernehmen wir das gesamte Risiko für Beschädigungen oder Verlust der Waren auf dem Transportweg. Für diese Leistung ist im Pauschalbetrag für Porto und Verpackung ein Anteil enthalten.
- (7) Unterliegt von uns gelieferte Ware gesetzlichen Ein- oder Ausfuhrbeschränkungen, so beschränkt sich unsere Sorgfaltspflicht auf die Kennzeichnung der Ware als Embargoware. Weiter erforderliche Maßnahmen obliegen dem Vertragspartner. Bis zu einem Warenwert von 500,00 Euro kann keine Warenverkehrsbescheinigung EUR 1 und kein Formblatt EUR 2 für den begünstigten Warenverkehr ausgestellt werden.

## § 3 Zahlungsbedingungen (Preise, Versandkosten)

- (1) Die angegebenen Preise sind Endpreise gem. PANGV und enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer sowie sonstige Preisbestandteile. Hinzu kommen etwaige Versandkosten.
- (2) Für jede Online-Bestellung unter € 200,00 berechnen wir Versandkosten in Höhe von 6,90 Euro bei Lieferung innerhalb Deutschlands. Versandkosten in das Ausland werden gesondert berechnet. Nachnahmegebühren der Post gehen zu Lasten des Kunden.
- (3) Der Vertragspartner hat die Möglichkeit der Zahlung per Vorkasse, Nachnahme, PayPal, Rechnung oder Bankeinzug.
- (4) Soweit Sie als Verbraucher von einem bestehenden Widerrufsrecht Gebrauch machen, haben Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurück zu sendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.
- (5) Hat der Vertragspartner die Zahlung per Vorkasse gewährt, so verpflichtet er sich, den Kaufpreis unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.
- (6) Werden bei der Bestellung elementare Informationen nicht übermittelt (z.B. Geburtsdatum), so erfolgt die Auslieferung der bestellten Ware in jedem Fall per Nachnahme. Die dafür entstehenden Mehrkosten werden dem Kunden in Rechnung gestellt.
- (7) Sofern von uns Lieferungen gegen offene Rechnungen vorgenommen werden, sind unsere Rechnungen zahlbar innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum. Unsere Rechnungen sind zahlbar rein netto, ohne Abzug von Skonto oder sonstigen Abzügen.
- (8) Ist für die Zahlung in dem Bestätigungsschreiben und/oder der Rechnung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt und wird dieser Zahlungstermin nicht eingehalten, treten die Verzugsfolgen ein, ohne dass es einer Mahnung bedarf.
- (9) Ist aufgrund falscher Daten oder Nichtdeckung des Kontos ein vereinbarter Lastschriftinzug nicht möglich, werden dem Kunden die anfallenden Gebühren von 10 Euro in Rechnung gestellt.

## § 4 Eigentumsvorbehalt

Der Verkäufer behält sich das Eigentum der Ware vor, bis sämtliche Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung einschließlich der künftigen entstehenden Forderungen auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen beglichen sind.

## § 5 Gewährleistung

- (1) Offensichtliche Mängel der Ware sind vom Kunden innerhalb von

zwei Wochen nach Erhalt zu reklamieren. Dem privaten Kunden stehen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte innerhalb von 24 Monaten nach Auslieferung zu, wobei wir uns jedoch zunächst das Recht der für den Kunden kostenlosen Nachbesserung oder Ersatzlieferung vorbehalten. Im Übrigen gilt ein Jahr Gewährleistung. Die MediTECH Electronic GmbH haftet nicht für Herstellergarantien. Wir haften nicht für Mängel, die infolge fehlerhafter Handhabung oder durch Fremdeinwirkung entstanden sind.

- (2) Bei Installationen sind unbedingt die Sicherheits- und VDE-Vorschriften zu beachten. Für Fehler, die durch unsachgemäße Behandlung, unrichtigen Gebrauch, fehlerhaften Anschluss und unzureichende oder fehlerhafte Peripherieeinrichtung (z. B. Antennen, Monitore, Drucker usw.) entstanden sind, übernehmen wir keine Gewährleistung.
- (3) Im Übrigen richtet sich die Gewährleistung nach den gesetzlichen Bestimmungen. Soweit gebrauchte Waren Gegenstand des Kaufvertrags sind und der Käufer nicht Verbraucher ist, wird die Gewährleistung ausgeschlossen. Ist der Kunde Verbraucher, beträgt die Gewährleistungsfrist beim Kauf gebrauchter Sachen ein Jahr.

## § 6 Haftung

- (1) Unsere Haftung begrenzt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Einschränkung gilt nicht bei leichter Fahrlässigkeit, wenn wesentliche Vertragspflichten verletzt worden sind. Die Haftung für Personenschäden sowie nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
- (2) Unsere Haftung bei Verzug und Unmöglichkeit und für Mangelfolgeschäden ist auf die Hälfte des jeweiligen Nettowarenwertes bzw. auf die Hälfte des Rechnungsbetrages begrenzt.
- (3) Für falsche Auskünfte haften wir nur, soweit eine ausdrücklich vereinbarte Beratung dem Vertragsabschluss vorausging. Technische Auskünfte sind unverbindlich und ohne jegliche Gewähr.

## § 7 Rücktritt

- (1) Ein Rücktritt vom Vertrag steht uns zu, wenn
  - (a) wir durch höhere Gewalt die Lieferung des Verkaufsgegenstandes nicht ausführen können.
  - (b) der Vertragspartner den vereinbarten Zahlungstermin um mehr als 14 Tage überschreitet und eine ihm gesetzte Nachfrist von mindestens 14 Tagen verstreichen lässt.
  - (c) der Vertragspartner wahrheitswidrige Angaben über Tatsachen die seine Kreditwürdigkeit betreffen gemacht hat.
- (2) Dem Vertragspartner steht ein Rücktrittsrecht zu, wenn
  - (a) wir durch vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten die Ausführung der Lieferung unmöglich machen.
  - (b) wir die um eine angemessene Nachfrist verlängerte Lieferzeit nicht einhalten.

## § 8 Datenschutz

- (1) Bei Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines Kaufvertrages werden von uns Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erhoben, gespeichert und verarbeitet.
  - (2) Beim Besuch unseres Internetangebots werden die aktuell von Ihrem PC verwendete IP-Adresse, Datum und Uhrzeit, der Browsertyp und das Betriebssystem Ihres PC sowie die von Ihnen betrachteten Seiten protokolliert. Rückschlüsse auf personenbezogene Daten sind uns damit jedoch weder möglich noch beabsichtigt.
  - (3) Die personenbezogenen Daten, die Sie uns z. B. bei einer Bestellung oder per E-Mail mitteilen (z. B. Ihr Name und Ihre Kontaktdaten), werden nur zur Korrespondenz mit Ihnen und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben. Wir geben Ihre Daten nur an das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen weiter, soweit dies zur Lieferung der Waren notwendig ist. Zur Abwicklung von Zahlungen geben wir Ihre Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut weiter.
  - (4) Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten im Übrigen nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, dass wir dazu gesetzlich verpflichtet wären oder Sie vorher ausdrücklich eingewilligt haben. Soweit wir zur Durchführung und Abwicklung von Verarbeitungsprozessen Dienstleistungen Dritter in Anspruch nehmen, werden die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten.
- Dauer der Speicherung  
Personenbezogene Daten, die uns über unsere Website mitgeteilt worden sind, werden nur so lange gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. Soweit handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die Dauer der Speicherung bestimmter Daten bis zu 10 Jahre betragen.

## Ihre Rechte

Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder diese unrichtig geworden sein, werden wir auf eine entsprechende Weisung hin im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Löschung, Korrektur oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen. Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, für Auskünfte, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an:

MediTECH Electronic GmbH, Langer Acker 7, 30900 Wedemark

Tel.: +49 (0)5130-97778-0, E-Mail: [service@meditech.de](mailto:service@meditech.de)

## § 9 Reparaturen

- (1) Bei Reparaturaufträgen erstellen wir schriftliche Kostenvorschläge, sofern die reinen Reparaturkosten einen Betrag von 50 Euro überschreiten. Liegen die voraussichtlichen Reparaturkosten unterhalb dieses Wertes, setzen wir das Einverständnis voraus und nehmen die Reparatur sofort vor.
- (2) Wir behalten uns innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Eingang des Reparaturauftrages die endgültige Annahme und Durchführung von Reparaturen vor, ebenso die Ablehnung von Reparaturaufträgen, wenn wir deren Durchführung für wirtschaftlich und/oder technisch nicht vertretbar halten. Aus einer von uns erteilten Reparatur- eingangsbestätigung kann daher kein Rechtsanspruch auf Erfüllung des Reparaturauftrages abgeleitet werden.

## § 10 Aufrechnung

Die Aufrechnung gegen uns zustehende Ansprüche aus Lieferungs- und/oder Anzeigengeschäften, denen diese vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrundeliegen, ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen möglich.

## § 11 Gerichtsstand/Vertragsprache/anwendbares Recht

- (1) Soweit der Vertragspartner Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlichrechtliches Sondervermögen ist oder seinen Sitz oder Wohnsitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland hat, wird für etwaige Streitigkeiten aus dem Vertrag und damit im Zusammenhang stehenden Rechtsbeziehungen Hannover als Gerichtsstand vereinbart.
- (2) Als Vertragsprache steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung.
- (3) Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Gegenüber einem Verbraucher gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt werden. Die Anwendung des UN-Kaufrechts wird übereinstimmend ausgeschlossen.

## § 12 Qualifizierte Schriftformklausel

- (1) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch für eine Änderung dieser Schriftformklausel.

WIDERRUFSBELEHRUNG bei der Bestellung von gedruckten Büchern und anderen Körperlichen Waren

### #### Widerrufsbelehrung ####

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Der Widerruf ist zu richten an:

MediTECH Electronic GmbH, Langer Acker 7, 30900 Wedemark

Tel: +49 (0)5130-97778-0, E-Mail: [service@meditech.de](mailto:service@meditech.de)

### Widerrufsfolgen

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt worden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Darüber hinaus besteht ein Widerrufsrecht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind.

### Finanzierte Geschäfte

Haben Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanziert und widerrufen Sie den finanzierten Vertrag, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, wenn beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder der Rückgabe bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem finanzierten Vertrag ein. Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, widerrufen Sie beide Vertragserklärungen gesondert.

Vom Widerruf ausgeschlossen sind Fachmagazine, Bücher, Baumapen, sonstige Literatur, Software, CDs/DVDs, Batterien, elektronische Bauteile sowie Bausätze und Teile, die bereits eingebaut bzw. bearbeitet oder geöffnet waren, sowie Sonderaufträge.

### #### Ende der Widerrufsbelehrung ####



Karen und Ralph Warnke

Unser erklärtes Ziel ist es, konkrete und praktische Hilfen für Menschen insbesondere auf dem Gebiet der zentralen Verarbeitung und Wahrnehmung zu erstellen und anzubieten.

Unser Programm umfasst:

- Test- und Trainingsgeräte
- Lernhilfen
- Fortbildungsprogramme
- Forschung

Mit einem eigenen Fortbildungsprogramm sorgen wir auch bei unseren Kooperationspartnern in ganz Europa für die Aufrechterhaltung des neuesten internationalen Wissensstandes auf diesem Arbeitsgebiet und darüber hinaus bei allen interessierten Ärzten und Therapeuten.

Sie möchten Kontakt zu einem unserer Zertifizierten Lerntrainer nach Warnke® oder einem unserer Netzwerkpartner aufnehmen? Kontaktadressen finden Sie unter

[www.meditech-partner.de](http://www.meditech-partner.de)

MediTECH Electronic GmbH  
Langer Acker 7  
D-30900 Wedemark (Region Hannover)

Telefon: +49 (0)5130-97778-0  
Fax: +49 (0)5130-97778-22  
E-Mail: [service@meditech.de](mailto:service@meditech.de)  
Internet: [www.meditech.de](http://www.meditech.de)